

Schemat planowania implantów CITO mini® w szczęce.

● filar strategiczny

○ filar opcjonalny

● ząb istniejący

Liczba koniecznych strategicznych filarów bazuje na konsensusie towarzystw implantologicznych BDO, DGMKG, DGI, DGZI z 2009r. (Szczeka=6 filary / Żuchwa=6 filarów dla protez ruchomych)^{1,2}

Liczbę jak i pozycję opcjonalnych filarów należy rozważyć odpowiednio do przypadku, decyzja podlega ocenie przez lekarza.

Klasa 0	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5
<ul style="list-style-type: none"> • bezzębnie 	<ul style="list-style-type: none"> • tylko przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • brak kła • 1 ząb od poz. 4 • ew. przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • brak kła • min. 2 zęby od pos. 4 • ew. przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • kięł • ew. przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • kięł • min. 1 ząb od pos. 4 • ew. przednie

Literatura: ¹ Mundt T, Lucas C, Biffar R, Heinemann F. Stabilisierung von Teilprothesen mit Mini-Implantaten – zwei Fallberichte. Dtsch Zahnärztl Z 2015;70:416-424.

² Mundt T, Al Jaghisi A, Schwahn B, Hilgert J, Lucas C, Biffar R, Schwahn C, Heinemann F. Immediate versus delayed loading of strategic mini dental implants for the stabilization of partial removable dental prostheses: a patient cluster randomized, parallel-group 3-year trial. BMC Oral Health. 2016 Jul 30;17(1):30. doi: 10.1186/s12903-016-0259-z

Schemat planowania implantów CITO mini® w żuchwie.

● filar strategiczny

○ filar opcjonalny

● ząb istniejący

Liczba koniecznych strategicznych filarów bazuje na konsensusie towarzystw implantologicznych BDO, DGMKG, DGI, DGZI z 2009r. (Szczeka=6 filary / Żuchwa=6 filarów dla protez ruchomych)^{1,2}.

Liczbę jak i pozycję opcjonalnych filarów należy rozważyć odpowiednio do przypadku, decyzja podlega ocenie przez lekarza.

Klasa 0	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3	Klasa 4	Klasa 5
<ul style="list-style-type: none"> • bezzębnie 	<ul style="list-style-type: none"> • tylko siekacze 	<ul style="list-style-type: none"> • brak kła • 1 ząb od pos. 4 • ew. przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • brak kła • min. 2 zęby od pos. 4 • ew. przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • kiel • ew. przednie 	<ul style="list-style-type: none"> • kiel • min. 1 zęby od pos. 4 • ew. przednie

Literatura: ¹ Mundt T, Lucas C, Biffar R, Heinemann F. Stabilisierung von Teilprothesen mit Mini-Implantaten – zwei Fallberichte. Dtsch Zahnärztl Z 2015;70:416-424.

² Mundt T, Al Jaghisi A, Schwahn B, Hilgert J, Lucas C, Biffar R, Schwahn C, Heinemann F. Immediate versus delayed loading of strategic mini dental implants for the stabilization of partial removable dental prostheses: a patient cluster randomized, parallel-group 3-year trial. BMC Oral Health. 2016 Jul 30;17(1):30. doi: 10.1186/s12903-016-0259-z